


LED走廊显示屏说明书

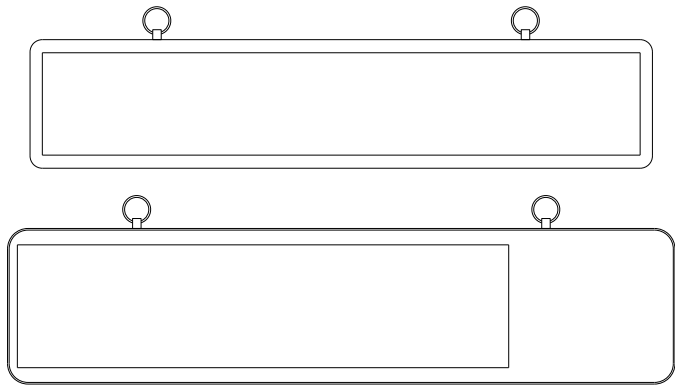

欢迎选用我公司的LED走廊显示屏产品！

BC252D6/BC252D12LED走廊显示屏采用当今最先进的电子通信技术设计，以优良的SMT工艺生产，经过严格的质量保证体系的测试与检验具有高集成度、高可靠性、高性价比等特点，为值得信赖的医护对讲产品。


二、产品快速设置

LED走廊显示屏接上电源开机，连接网线，设备显示开机信息、时间。用【中文显示屏转接板IP设置工具】打开，点击【搜索设备】键，在搜索到的IP地址上双击，修改相对应的IP地址，点【OK】键确认。

三、护士工作站设置

运行护士工作站，中文显示屏可以及时更新当前时间，点击【数据信息】下拉菜单下的【中文显示屏信息发布】子菜单，进入【中文显示屏信息发布】子菜单界面。中文显示屏界面，在内容窗口输入需要发布的信息后，点击【发送】键，最大信息量为15条，超出信息量时，会覆盖第一条信息。护士站下发信息，中文显示屏可以正常接收发布信息，每屏显示六个字符，超出范围下一屏显示。在中文显示屏菜单界面，在信息列表选中发布信息，点【删除】键，可以删除信息，中文显示屏也能及时清除发布信息。点击【操作员管理】下拉菜单下的【中文显示屏设置】子菜单。在【中文显示屏设置】子菜单界面，中文显示屏发布信息显示方式，是由【护士发送消息设置】。

四、安装说明

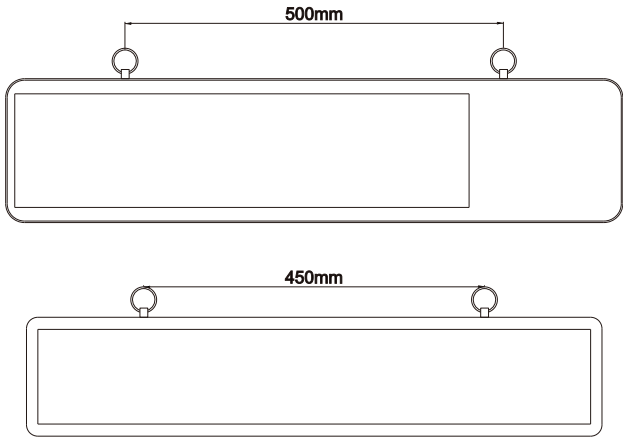


- 1.按图纸两圆环间直径距离在墙顶面安装铁链
- 2.将圆环挂在铁链上即可安装完毕


装箱清单（表中配件可能根据型号不同而有所增或减）

序号	名称	数量	备注
1	走廊显示屏	1台	
2	说明书	1本	
3	合格证	1张	
4	配件包	1套	配件包单独包装，内含：挂板、电源线、电源适配器、配线等。不同型号产品配件包可能有所不同，以实物为准。

一、产品介绍

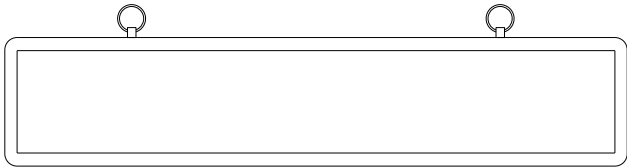

BC252D6

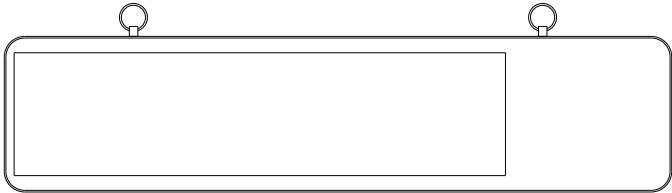

BC252D12

四、技术参数

产品型号	BC252D6	BC252D12
供电电源	AC220V	
供电电压	AC220V	
最大功耗	50W	
工作温度	-10℃ to 50℃	
工作湿度	10% to 95%	
联网接口	RJ45 10M/100M	
安装方式	悬挂安装	
整机尺寸	760*157*35mm	815*190*35mm
预埋盒尺寸	-	

五、故障分析与排除

如系统不正常，断电后请按《简单故障排除表》逐一检查。如未查明故障原因，请通知代理销售商或厂家，不可自行打开修理或更换元件而造成系统损坏。

简单故障排除表

序号	故障现象	故障原因分析	排除方法
1	LED走廊显示屏无显示	电源供电问题	检查电源供电是否正常
2	无法同步时间	网络不通	检查网线是否接触不良
3	呼叫信息没有在中文屏上显示	护士站软件没打开	在护士站的电脑上打开护士站软件，并保持运行状态

为维护您的权益，请您认真填写，并妥善保管，作为维修时的凭证：

产品保修卡——用户存根

经销商信息	经销商名称	
	联系电话	
	产品型号	
	产品编号	
	销售日期	
用户信息	用户名称	
	联系电话	
	通讯地址	
	E-mail	

产品保修卡——经销商存根

经销商信息	经销商名称	
	联系电话	
	产品型号	
	产品编号	
	销售日期	
用户信息	用户名称	
	联系电话	
	通讯地址	
	E-mail	